



LipoZero G39

El ultrasonidos y cavitación Globus LipoZero G39 ha sido desarrollado para combatir la celulitis y los pliegues adiposos particularmente gruesos, gracias a su frecuencia de 39 Khz puede actuar en profundidad de manera efectiva. Cuenta con 49 programas y dispone de MF Plus, Tratamientos multifrecuencia para aplicaciones de 3 y 1 Mhz como también 526 y 150 Khz que permiten optimizar los resultados.

El mecanismo cavitacional se produce eficazmente sólo con bajas frecuencias, inferiores a 600 KHz, dado que sólo de este modo llega a penetrar en profundidad para demoler el tejido adiposo. Cuanto más baja es la frecuencia, mayor es la profundidad del impacto y su acción.

El ultrasonidos y cavitación Lipozero G39 de Globus dispone de 2 cabezales de aplicación (Ø 50 mm para 39 KHz y Ø 42 mm para 3, 1 Mhz y 526, 150 KHz) dado que sus frecuencias de emisión son:

- 39 KHz para Celulitis y Pliegues adiposos particularmente gruesos y profundos y que necesitan de una acción particularmente enérgica. (Top Profesional)
- 150 KHz para Celulitis y adiposidad un poco menos espesa y profunda. (Profesional)
- 526 KHz para asociar la demolición adiposa con la producción de Noradrenalina (NorAd-526) que hace quemar las grasas a través del aumento del metabolismo. Particularmente indicada para el tratamiento de la adiposidad abdominal masculina.
- 3 MHz para tratamientos de belleza más superficiales y para la piel.

MF Plus – Tratamientos Multifrecuencia: Exclusiva Mundial Globus

Investigaciones científicas internacionales han demostrado que la aplicación de Cavitación con Modulación de la Frecuencia (alternancia de frecuencias diversas) produce mejores resultados, ya que la asociación de frecuencias diferentes permite actuar contemporáneamente a diversas profundidades y personalizar los tratamientos en función del tipo de celulitis .

Mecanismo de acción:

Cuando el tejido adiposo es alcanzado en profundidad por la energía ultrasónica a baja frecuencia se determinan en su interior fases cíclicas de compresión y descompresión que producen la formación de cavidades contenedoras de gas y vapor. Gracias a este mecanismo de acción las cavidades creadas continúan expandiéndose y comprimiéndose siempre con mayor energía hasta que explotan consiguiendo la demolición del tejido adiposo. La grasa contenida en los adipositos es así liberada y eliminada a través de la circulación sanguínea, sin dañar mínimamente el tejido circundante.

49 programas terapéuticos para el tratamiento de las principales patologías y 30 programas memorizables:

49 Programas: 4 Cavitación Ultracav 39 Khz , 6 Cavitación Cavimax150 Khz , 10 MF-Plus-Tratamientos, multifrecuencias , 5 Movilización Adiposidad NorAd-526 , 4 Adiposidad Masculina , 10 Belleza , 10 Piel.

ULTRA-CAV 39 KHz

Total Body 3-6 cm, Total Body > 6 cm, Muslos-glúteos 3-6 cm, Muslos-glúteos >6 cm,

CAVITACION CAVIMAX 150 Khz

Lipólisis, Lipólisis faja abdominal, Celulitis, Celulitis edematosa, Celulitis fibrosa, Culotte de cheval, Celulitis edematosa piernas, Celulitis fibrosa piernas, Celulitis piel "piel de naranja".

MF-PLUS

Lipólisis, Celulitis, Celulitis edematosa, Celulitis fibrosa, Culotte de cheval, Celulitis piel "piel de naranja", Adiposidad masculina abdomen,
Adiposidad masculina caderas, Adiposidad masculina miembros inferiores, Adiposidad masculina miembros superiores.

MOVILIZACION ADIPOSIDAD NorAd-526

Lipólisis-NorAd-526, Celulitis- NorAd-526, Adiposidad- NorAd-526, NorAd-526 1, NorAd-526 2.

ADIPOSIDAD MASCULINA

Adiposidad masc.abdomen, Adiposidad masc. Caderas, Adiposidad masc.miembros inferiores, Adiposidad masc.miembros superiores.

BELLEZA

Reafirmante, Masaje, Modelado, Modelado piernas, Modelado abdomen, Drenaje, Drenaje piernas, Drenaje brazos, Estrías, Aplicación principios activos.

PIEL

Acné, Lifting facial, Tratamiento arrugas, Cicatrices, Couperosa, Forúnculos cuerpo, Forúnculos rostro, Skin restructure, Skin smoothing, Photoaging.